



Het is fijn om een reële inschatting van mijn kansen te hebben.

Maakt me beter voorbereid: meer rust en minder stress.

Hoe meer kennis vooraf, hoe beter.

uitspraken uit online onderzoek onder vrouwen via Freya website - januari 2018

WAT IS RECEPTIVITY?

ReceptiVFity is een nieuwe test waarmee je van tevoren beter inzicht kunt krijgen in de kans van slagen van een IVF- of ICSI-poging. Deze test wordt voorafgaand aan een IVF- of ICSI-behandeling gedaan en onderzoekt of de omstandigheden in de baarmoeder nu geschikt zijn voor de innesteling van een embryo.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van bacteriën in de vagina (het vaginale microbiom) belangrijk is voor de kans op zwanger worden met behulp van een fertiliteits-behandeling zoals IVF of ICSI. De onderlinge verhouding tussen de verschillende soorten bacteriën vormt een profiel dat een (zeer) goede of ongunstige ReceptiVFity score geeft.


DE TEST, HOE WERKT HET?

Voor de start van een IVF- of ICSI-behandeling neem je zelf, met een speciaal wattenstaafje uit het testpakket, wat slijm uit de vagina af. Na afname wordt het wattenstaafje in het meegeleverde buisje met vloeistof geplaatst. Vervolgens wordt het opgestuurd naar een laboratorium. Daar bepaalt men op basis van het verzamelde bacteriële DNA jouw microbiom-profiel. Na 7 werkdagen krijgt je arts de uitslag van de test en zal hij /zij jouw persoonlijke score met je bespreken.


UITSLAG VAN DE TEST

De ReceptiVFity test bepaalt hoe het profiel van de bacterie-huishouding in de vagina eruitziet. De test kan drie scores opleveren.

Gemiddeld hebben 1 op de 6 vrouwen een **zeer goede** score, waarbij de kans op zwangerschap op dat moment hoog (64,4%)* is. Gemiddeld 4 op de 6 vrouwen hebben een **goede** score, waarbij de kans op zwangerschap op dat moment 34,4%* is. Eén op de 6 vrouwen heeft een **ongunstige** score; dat houdt in dat de kans op een zwangerschap op dat moment laag is (5,2%*).

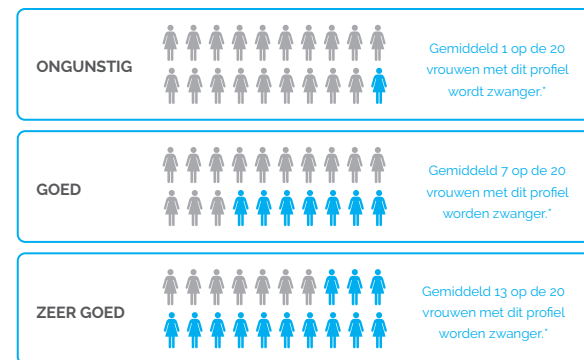

*% door echo vastgestelde zwangerschappen na een eerste embryo-terugplaatsing. Voorspelling is geoptimaliseerd voor vrouwen van blanke etniciteit, data voor andere etniciteiten worden actief verzameld voor toekomstige voorspelling op maat. Voorspelling is van toepassing op alle Embryo Transfers (verse & bevroren ET's). Voorspelling is geschikt voor alle IVF/IVF-ICSI-patiënten (van 1e tot laatste IVF-poging). Voorspelling kan worden gebruikt voor alle vrouwen (wel en niet eerder zwanger).

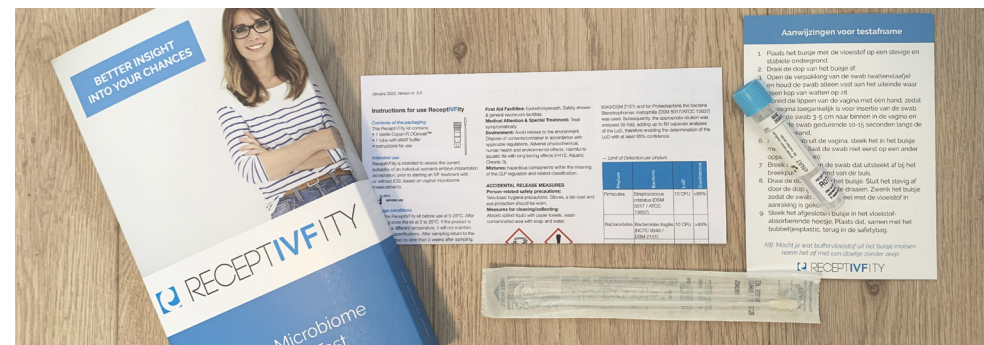

De uitslag is het meest voorspellend als de tijd tussen de test-afname en de embryotransfer een maand of minder is, met een maximale tijd tot 2 maanden.

Als je een goede of zeer goede score hebt, wil dat nog niet zeggen dat je zeker zwanger wordt, maar je kans is wel goed. Naast de bacteriehuishouding spelen er ook andere factoren een rol in de zwangerschapskans. Zoals de kwaliteit van de eicellen en de zaadcellen, de levensvatbaarheid van het embryo, het lichaamsgewicht (BMI) en de leeftijd van de vrouw.

EEN OVERZICHT VAN HET TRAJECT EN DE KEUZES

Nadat je de keuze hebt gemaakt om een IVF- of ICSI-traject in te gaan, kun je in overleg met de arts bepalen of je de test wilt afnemen. De test is zeer eenvoudig, heeft geen bijwerkingen en de uitslag is relatief snel beschikbaar.

Een ongunstige score, en dan?

Mocht de uitslag voor jou een ongunstige score weergeven, dan bespreek je met je arts de opties en het verdere behandelplan. Het is belangrijk om te weten dat de ReceptIVFity test een bewezen betrouwbare voorspelling doet voor een periode van twee maanden. Het microbioom en dus jouw profiel kan in de loop van de tijd veranderen en geeft de meest betrouwbare voorspelling op een succesvolle embryo transfer in de eerste maand na testafname. Uit een recente Duitse studie bleek dat de meerderheid van de vrouwen met een ongunstig profiel, veranderden naar een goede of zeer goede ReceptIVFity score bij een hertest binnen 3 maanden (zonder verdere behandeling). Er wordt nog verder onderzoek gedaan om te kijken of en hoe een ongunstig profiel te beïnvloeden is.

Samen een beslissing nemen

Ongeacht het testresultaat: de beslissing over het verdere traject ligt volledig bij jou (en je partner). In overleg met je arts, en op basis van je persoonlijke omstandigheden, besluit je of je de IVF- of ICSI-behandeling op dat moment wilt starten of niet.

Bij dit besluit kunnen meerdere factoren een rol spelen. Te denken valt aan:

- De lichamelijke en geestelijke belasting van een IVF- of ICSI-behandeling
- Het aantal IVF- of ICSI-pogingen (en/of het aantal terugplaatsingen) dat je (nog) vergoed krijgt.
- Eventuele behandelkosten die voor je eigen rekening komen
- Andere persoonlijke factoren

VRAGEN?

Heb je na het gesprek met je arts en het lezen van deze folder nog vragen?

Je kunt aanvullende informatie vinden op de website: www.receptivfity.com of contact opnemen via e-mail: info@receptivfity.com.

Versie 4.0 Maart 2023



MEER INZICHT
IN JE KANSSEN

PATIËNTEN INFORMATIEFOLDER